

Насадки сменные мягкие для назального аспиратора Отривин Бэби Комфорт

Сменные мягкие насадки идеально подходят для носика малыша; содержат впитывающий фильтр, удерживающий слизь.

Перед использованием следует внимательно ознакомиться с информацией на упаковке.

Одноразовые насадки гигиеничны в применении.

Во избежание повторного инфицирования использованную насадку следует выбросить.

Не следует использовать аспиратор и насадки при наличии аллергии на материалы, из которых изготовлены компоненты изделия.

Состав: поливинилхлорид меламиновая пена.


Не следует использовать аспиратор, если он испорчен или поврежден.

В упаковке содержатся десять мягких одноразовых насадок с абсорбирующим фильтром для использования с аспиратором назальным Отривин Бэби Комфорт, который приобретается отдельно. Анатомическая форма насадки позволяет легко установить ее в носовой ход ребенка, исключая травмирование. В каждой насадке содержится абсорбирующий фильтр, задерживающий слизистые выделения, что обеспечивает чистое и гигиеническое использование. Аспиратор назальный Отривин Бэби Комфорт предназначен для детей (новорожденных, грудных, младшего возраста). Аспиратор способствует очищению носа Вашего ребенка, мягко удаляя беспокоящие его слизистые выделения.

Удаление слизистых выделений из носа способствует предотвращению осложнений, например, отита, синусита и кашля.

Для облегчения процедуры перед использованием назального аспиратора Отривин Бэби Комфорт рекомендуется промыть нос солевым раствором, например, каплями Отривин Бэби.

Способ применения:

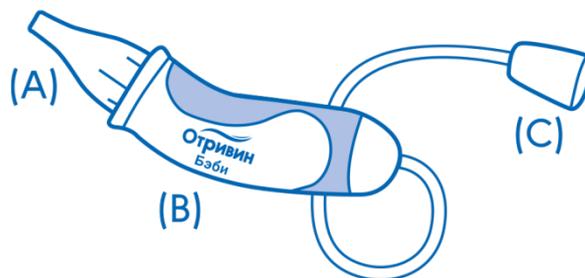

1. Присоедините сменную насадку (А) к центральной части корпуса (В) аспиратора.
2. Возьмите мундштук (С) в рот (для родителей и лиц, ухаживающих за ребенком) и вставьте наконечник (А) в один из носовых ходов ребенка.

3. Осторожно втягивайте воздух ртом при помощи равномерных вдохов через мундштук (С).
4. Если насадка заполняется выделениями в промежутке между вдохами, удалите секрет из насадки в салфетку, продувая мундштук, или замените насадку.
5. Повторите процедуру для другого носового хода.
6. Отсоедините и выбросьте использованную насадку (А).

В целях соблюдения гигиены и для исключения повторного инфицирования насадки следует использовать лишь однократно.

Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке. Хранить при температуре от 0 °С до 30 °С.

Срок годности 3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Медицинское изделие,

рег. удостоверение

№ФСЗ2008/01134от05.05.2022.

Производитель - ГСК Консьюмер Хелскер САПЛ, Рю де Летраз, 1197 Пранжен, Швейцария.

Legal manufacturer - GSK Consumer Healthcare SARL, Route de l'Etraz, 1197 Prangins, Switzerland.

Организация, принимающая претензии на территории Российской Федерации:

АО "ГлаксоСмитКляйн Хелскер", Россия, 123112, Москва, Пресненская набережная, д.10, помещение III, комната 9, эт. 6. Тел. 8 (495) 777-98-50;

факс 8 (495) 777-98-51 Телефон бесплатной

"Горячей линии"

8 800 333 46 94

E-mail: rus.info@gsk.com