

## **Аспиратор назальный Отривин Бэби**

### **Назначение:**

Аспиратор назальный Отривин Бэби используют у детей (новорожденные, младенцы и младшего возраста) для мягкого удаления слизистых выделений из носа.

Аспиратор прост и гигиеничен в применении. С его помощью можно облегчить носовое дыхание малыша, чтобы он вновь почувствовал себя комфортно.

Удаление слизистых выделений помогает предотвратить дальнейшие осложнения: ушные инфекции (отит), инфекции пазух (синусит) или кашель.

Для облегчения процедуры перед использованием назального аспиратора Отривин Бэби рекомендуется промыть нос солевым раствором, например, каплями Отривин Бэби.

### **Способ применения:**

1. Присоедините сменную насадку к центральной части корпуса аспиратора.
2. Возьмите мундштук в рот (для родителей и лиц, ухаживающих за ребенком) и вставьте наконечник в один из носовых ходов ребенка.
3. Осторожно втягивайте воздух ртом при помощи равномерных вдохов через мундштук.
4. Если насадка заполняется выделениями в промежутке между вдохами, удалите секрет из насадки в салфетку, продувая мундштук, или замените насадку.
5. Повторите процедуру для другого носового хода.
6. Отсоедините и выбросьте использованную насадку.

В целях соблюдения гигиены и для исключения повторного инфицирования насадки следует использовать лишь однократно.

Одноразовые сменные насадки для аспиратора Отривин Бэби продаются отдельно.

Аспиратор назальный Отривин Бэби с тремя сменными насадками предназначен для устранения выделений из носа, беспокоящих Вашего малыша при насморке.

К аспиратору прилагаются 3 одноразовые сменные насадки. Перед использованием следует внимательно ознакомиться с информацией на упаковке.

Не следует использовать аспиратор, если он испорчен или поврежден, при наличии аллергии на компоненты материалов аспиратора и насадок.

### **Состав:**

аспиратор – силиконовая трубка, полиэтилен, полипропилен; насадки – полипропилен, меламиновая пена.

Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке. Хранить при температуре от 0 °С до 30 °С. Срок годности 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Медицинское изделие

рег. удостоверение № ФСЗ 2008/01133 от 05.05.2022.

Организация, принимающая претензии на территории Российской Федерации: АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер», Россия, 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, помещение III, комната 9, эт. 6. Тел. 8 (495) 777-98-50; факс 8 (495) 777-98-51 Телефон бесплатной «Горячей линии» 88003334694 E-mail: rus.info@gsk.com